



# Gebruiksaanwijzing Rollator Design

Verstrekking via UVIT zorgverzekeraar



## Algemene informatie

Een rollator is een hulpmiddel bij het lopen en kan zowel binnens- als buitenshuis worden gebruikt. Op deze wijze wordt uw mobiliteit bevorderd. Ook kunt u er even op gaan zitten om uit te rusten. De rollator is geschikt voor personen tot maximaal 125 kg. De rollator weegt 8,4 kg. De rollator is uitgevoerd met een boodschappennetje, een krukhouder en een transporttas. De krukhouder is geschikt voor wandelstokken of elleboogkrukken met een diameter van 18 tot 22 mm.

## Instellen van de hoogte van de handgrepen

Zorg dat u zich zeker voelt achter uw rollator. U moet er voldoende steun van krijgen. Blijf zo rechtop mogelijk lopen tussen de twee achterste wieltjes in, zo heeft u de optimale ondersteuning. Let daarom goed op de hoogte van de handgrepen. Deze hoogte is in te stellen van  $\pm 76$  tot  $\pm 98$  cm.

- Draai de klemschroef onder het zitje los.
- Trek de duwbuizen omhoog tot de gewenste hoogte.
- Stel in op de juiste hoogte: bij omlaag hangende arm moet de handgreep zich ter hoogte van het polsgewricht bevinden.
- Draai de klemschroef weer goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen worden.

## Remmen

De rollator is uitgevoerd met twee typen remmen: de looprem en de parkeerrem. De achterwielen van de rollator zijn beiden beremd. Door de hendels onder de handvaten in te knijpen, stelt u de looprem in werking en stopt u de rollator. De parkeerrem stelt u in door de hendels

van de looprem naar beneden te drukken, totdat deze vastklikken. Wilt u op de rollator gaan zitten, dan dient u de parkeerrem te gebruiken. Trek de remgrepen naar boven om ze uit de vergrendeling vrij te maken.

## Opbergen en weer gebruiken

Vouw het rollatorframe op door de polsgrepen van de zitting tot aan de aanslag omhoog te trekken.

## Onderhoud

- Het verdient aanbeveling om eens per jaar alle schroeven en moeren aan te draaien en de remkabels te laten controleren. De banden zijn volledig onderhoudsvrij.
- De rollator kan gereinigd worden met water en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen.